


Bruksanvisning Inserter R




Fjærbelastet stempel

Sikrings og avtrekkerknapp

1.) Sett inn nålen som vist og skyv stempelet inn til det stopper og ikke kommer ut igjen. Et klikk skal høres og sikrings og avtrekkerknappen skal komme litt ut.

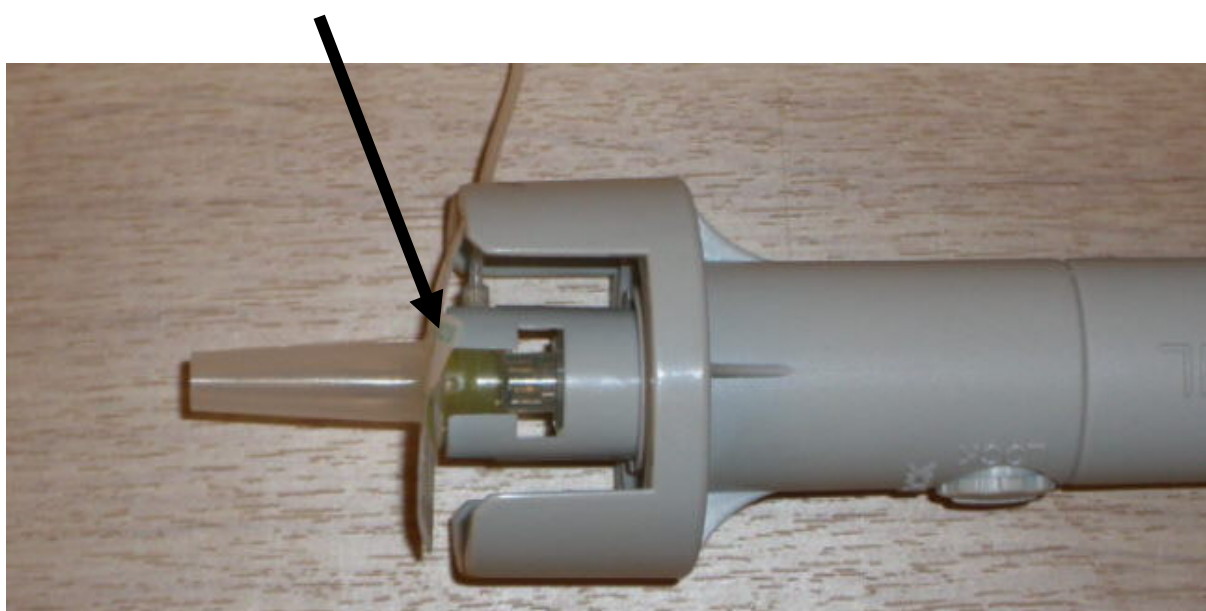


2) Vri sikrings og avtrekkerknappen til låst (lock) posisjon. **VIKTIG!!**. Fjern beskyttelsehetten fra nålen og ta bort dekkfolien som beskytter plasterlimet.

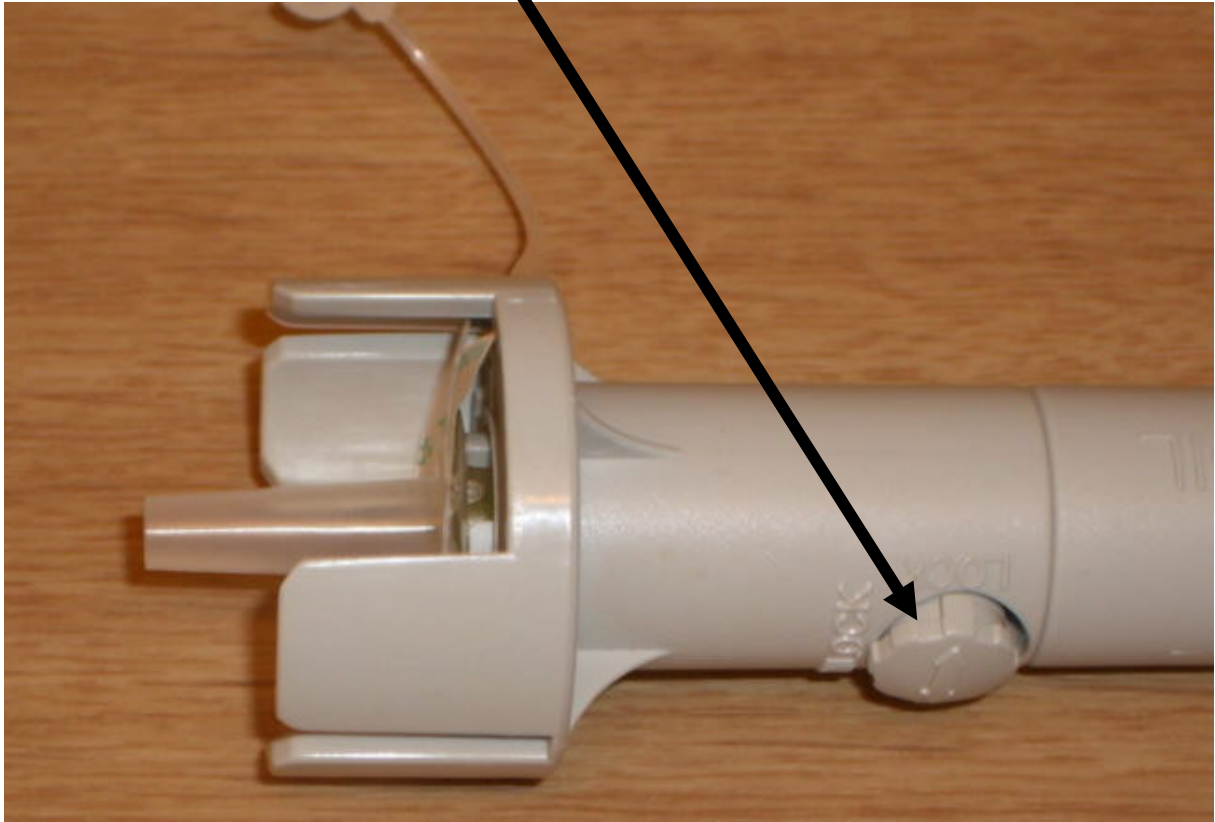

3) Sett hodet på inserteren plant mot valgte området på mavepartiet. Dette vil sikre at nålen skytes inn i korrekt vinkel under huden.

4) Vri sikringen til Unlock og trykk inn. Nålen skytes inn i huden.

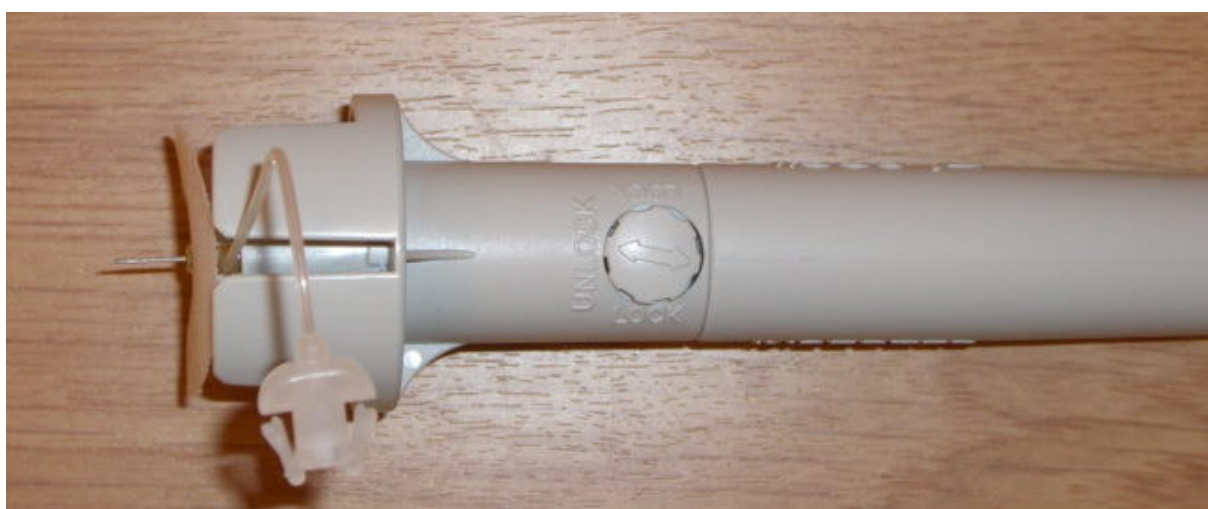

5) Ta bort Inserteren fra nålen og følg deretter normal festeprosedyre for nålen

HUSK.

De vanlig hygienereglene skal følges. Ref bruksanvisning for insulinpumpen Dana Diabecare II og instruksjon fra din diabetessykepleier.