



Bruksanvisning Inserter ST

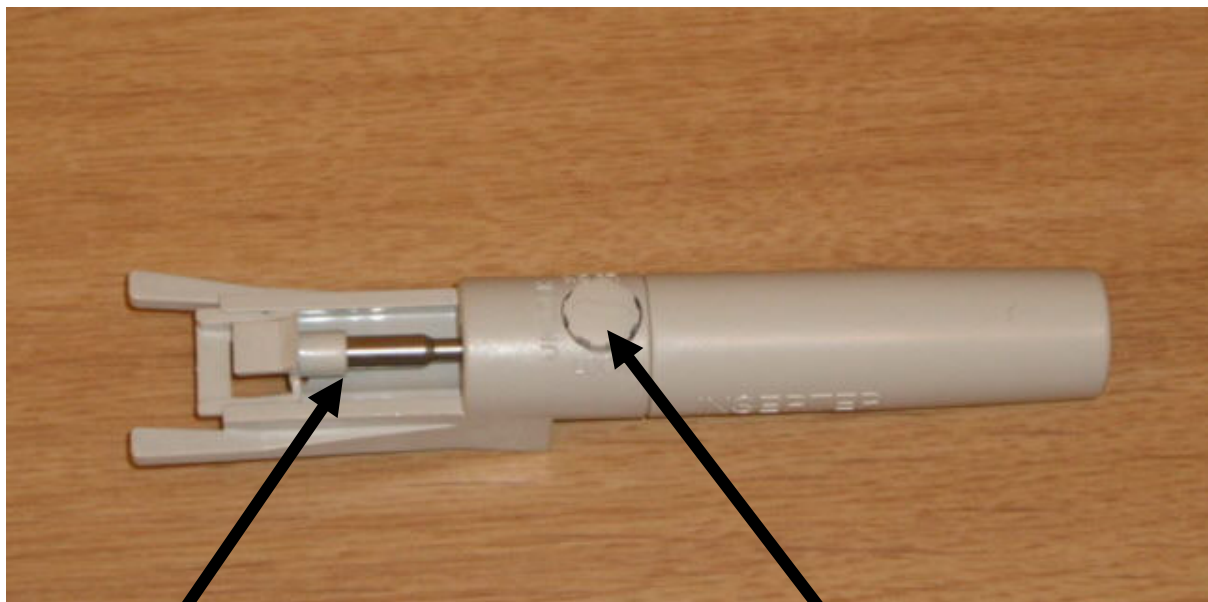

Fjærbelastet stempel


Sikrings og avtrekkerknapp


1.) Sett inn nålen som vis og skyv stempelet inn til det stopper

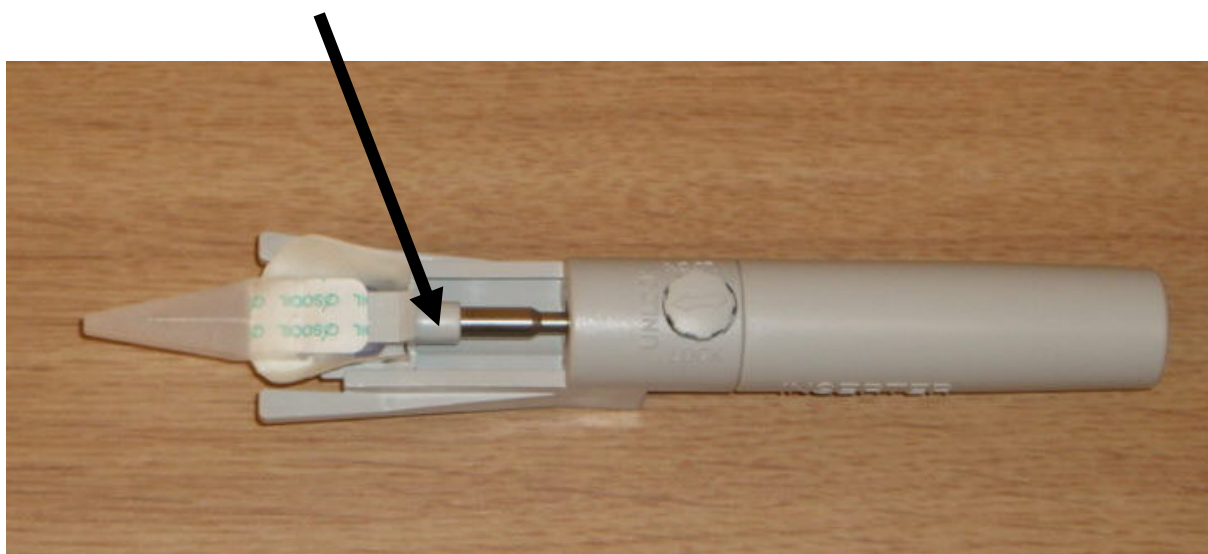




2) Vri sikrings og avtrekkerknappen til låst (lock) posisjon. Fjern beskyttelseshetten fra nålen

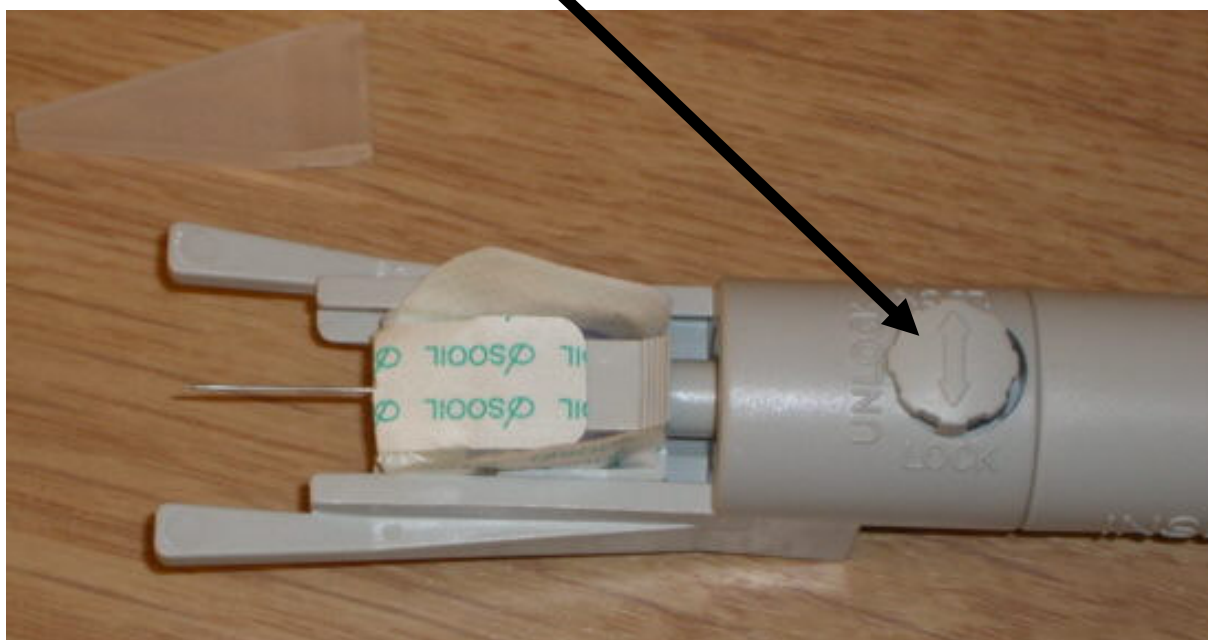

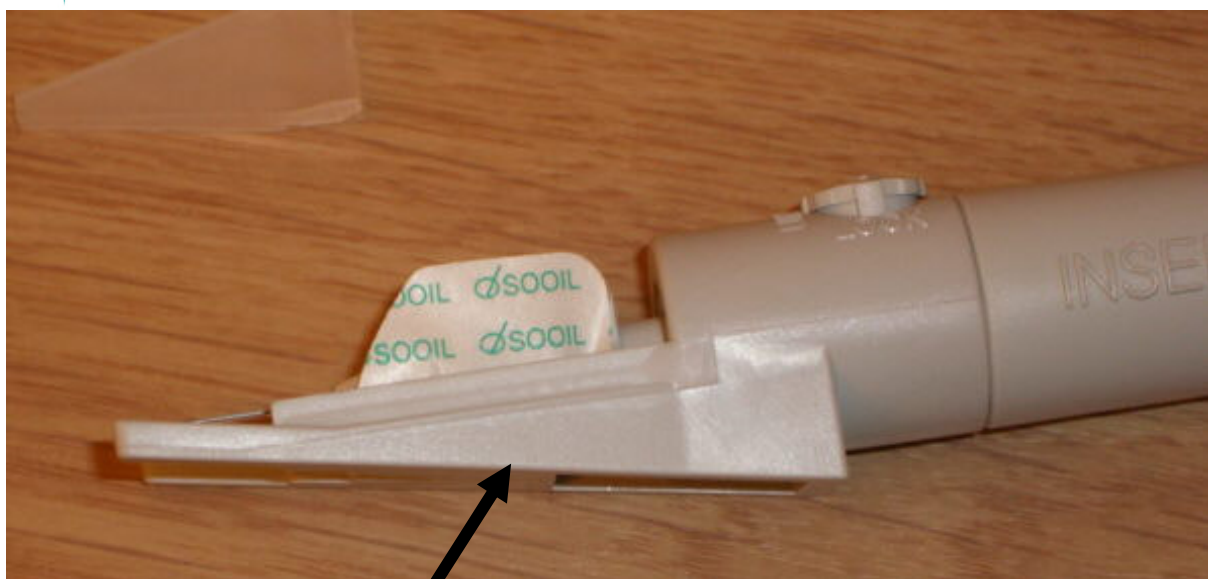

3) Legg platen plant på mavepartiet. Dette vil sikre at nålen skytes inn i korrekt vinkel under huden.

4) Vri sikringen til Unlock og trykk inn. Nålen skyves inn under huden.

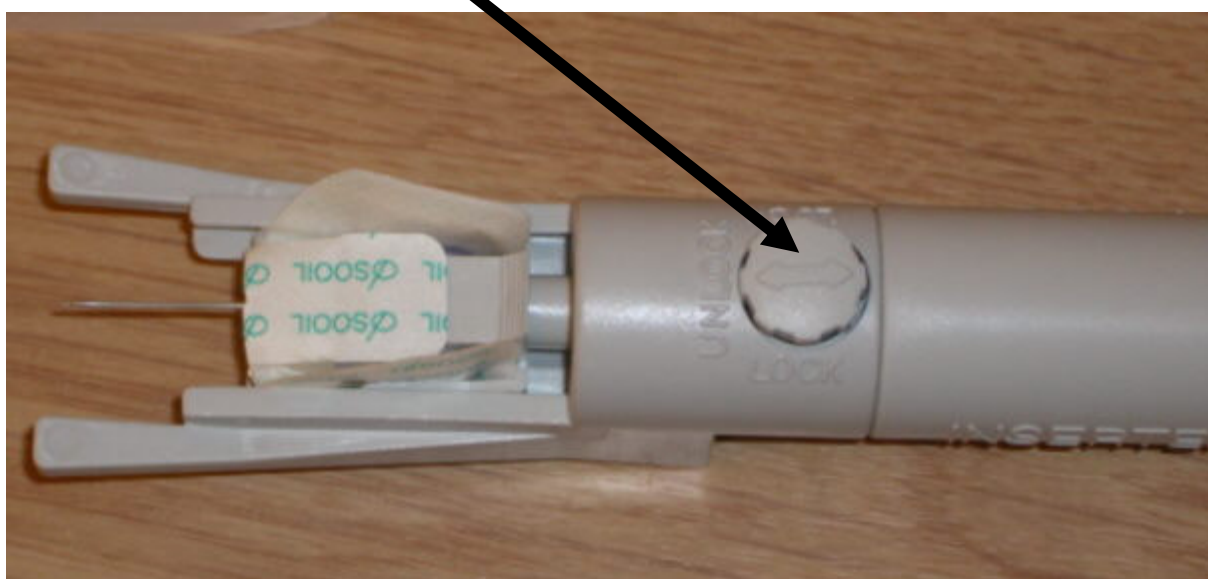

5) Ta bort Inserteren fra nålen og følg deretter normal festeprosedyre for nålen

